

Größen: (S) Ø 7–9 mm, (M) Ø 8–11 mm, (L) Ø 9–13 mm

**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel gegen schädlichen Lärm (EN352-2:2020, EU 2016/425). Prüfstelle für Konformitätsbewertung und Überwachung gemäß Modul C2: PZT GmbH (1974), Bismarckstraße 264B, 26389 Wilhelmshaven, Deutschland. **Das Produkt darf nur bestimmungsmäßig verwendet werden.**

**Hinweis:** die Stöpsel müssen in Übereinstimmung mit den Hinweisen des Herstellers montiert, eingestellt und gewartet werden.

**SANOHRA pro sleep – für ruhige Nächte und produktive Tage**

Erleben Sie erholsamen Schlaf mit **SANOHRA pro sleep** Ohrstöpseln. Diese innovativen Ohrstöpsel bieten optimale Lärmreduktion, indem sie störende Geräusche wie Verkehrslärm und Schnarchen effektiv dämpfen. Dank ihrer ergonomischen, ovalen Form passen sie sich perfekt an die natürliche Ohrstruktur an, was für maximalen Tragekomfort sorgt. Verbessern Sie Ihre Schlafqualität und genießen Sie tiefen, ungestörten Schlaf. Beginnen Sie jeden Tag erfrischt und voller Energie.

- ✓ **Optimale Lärmreduktion**
- ✓ **Verbesserte Schlafqualität**
- ✓ **Bequemer Sitz durch ovale Form**



**Einsetzen von SANOHRA pro sleep**

Einen Arm über den Kopf führen und den oberen Teil der Ohrmuschel des auf der anderen Kopfseite befindlichen Ohres leicht anzuheben. So wird der Gehörgang geweitet. **SANOHRA pro sleep** am Schaft zwischen Daumen und Zeigefinger der anderen Hand fassen und mit leichter Drehbewegung mit den Lamellen voran in den Gehörgang einsetzen. Bei dem anderen Ohr genau so verfahren.

**Herausnehmen von SANOHRA pro sleep**

Vor dem Herausnehmen die Ohrmuschel wie beschrieben leicht anheben. Den Ohrenschutz **nicht ruckartig herausziehen** sondern langsam mit einer leichten Drehbewegung entfernen.

*Kinder dürfen den Ohrenschutz nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Bei Kindern unter 3 Jahren sollte sichergestellt werden, dass der Ohrenschutz ausschließlich von Erwachsenen eingesetzt und auch wieder herausgenommen wird. Die Verwendung des Ohrenschutzes sollte mit dem behandelnden Arzt zuvor besprochen werden.*

**WARNUNG! ERSTICKUNGSRISIKO! KLEINE TEILE.** Kinder dürfen den Ohrenschutz nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Die Gehörschutzstöpsel müssen in Übereinstimmung mit den Hinweisen des Herstellers montiert, eingestellt und gewartet werden.

**Warnhinweise zur Verwendung von SANOHRA pro sleep**

**Achtung:** Bei Nichtbeachtung der Gebrauchshinweise und Einsetzanleitung kann die Schutzwirkung von **SANOHRA pro sleep** gegen Lärm erheblich beeinträchtigt werden. Gehörschutzstöpsel sollten in Lärmereichen ohne Unterbrechung getragen werden.

**Warnung:** Plötzliches oder schnelles Entfernen der Gehörschutzstöpsel aus dem Gehörgang kann das Trommelfell schädigen.

**SANOHRA pro sleep** kann bei sachgemäßer Pflege wieder verwendet werden. Zur Reinigung kann das Produkt mit mildem Reinigungsmittel (Seife) gereinigt werden. In regelmäßigen Abständen bitte das Produkt auf Beschädigungen prüfen und gegebenenfalls ersetzen. Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden. Weitere Angaben sollten beim Hersteller angefordert werden. Es wird empfohlen **SANOHRA pro sleep** nach Gebrauch wieder in dem mitgelieferten Döschen aufzubewahren. Es sollte dabei kühl und trocken gelagert werden. Alle Teile der Gehörschutzstöpsel sind so konstruiert und produziert, dass sie unter Beachtung der Gebrauchsanweisung beim Tragen keine Verletzungen verursachen.

**Schalldämmung**

Wert [dB]	SNR = 24 dB	H = 25 dB	M = 21 dB	L = 20 dB
Mittelwert	27,2	28,5	24,8	23,4
Standardabweichung	3,5	3,1	4,2	3,8

Frequenz [Hz]	Schalldämmung [dB]	Standard Abweichungen [dB]	APV [dB]
63	23,5	4,5	19,0
125	24,8	5,1	19,7
250	23,0	3,4	19,6
500	22,1	4,5	17,6
1000	25,4	5,2	20,2
2000	31,5	3,7	27,8
4000	29,8	5,1	24,7
8000	32,9	5,5	27,4

Entspricht der europäischen Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (CE), EN352-2:2020, EN24869-1. Notified Body PZT GmbH Number: 1974

**Erklärung:** Hiermit erklärt die Innosan GmbH, dass die PSA SANOHRA pro fly der Verordnung (EU)2016/425 entspricht. Der vollständige Text der EU- Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.sanohra.com/downloads>



Hersteller: Innosan GmbH · D-68723 Schwetzingen · Beethovenstraße 3 · Germany  
E-Mail: [info@sanohra.com](mailto:info@sanohra.com) · Internet: [www.sanohra.com](http://www.sanohra.com)