

D SANOHRA pro dive – Gebrauchsinformationen

Größen: (S) \varnothing 7–9 mm, (M) \varnothing 8–11 mm, (L) \varnothing 9–13 mm


Bestimmungsgemäße Verwendung

Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel zum Tauchen. Dieser Gehörschutz ist **nicht gegen schädlichen Lärm (EN352-2:2020, EU 2016/425) einzusetzen**. Das Produkt darf nur bestimmungsmäßig verwendet werden.

Hinweis: die Stöpsel müssen in Übereinstimmung mit den Hinweisen des Herstellers montiert, eingestellt und gewartet werden.

SANOHRA pro dive erlauben den Druckausgleich beim Tauchen

Normale Ohrstöpsel zum Schwimmen dichten den Gehörgang ab, sodass kein Druckausgleich erfolgen kann. **SANOHRA pro dive** erlauben den Druckausgleich beim Tauchen durch eine spezielle Öffnung im Gehörschutzkörper. Dieser ermöglicht es dem Taucher den notwendigen Druckausgleich während des Tauchganges vorzunehmen.

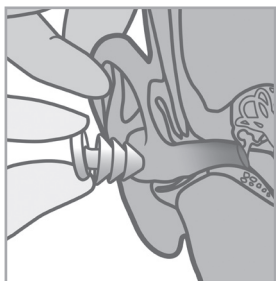

Einsetzen von SANOHRA pro dive

Einen Arm über den Kopf führen und den oberen Teil der Ohrmuschel des auf der anderen Kopfseite befindlichen Ohres leicht anzuheben. So wird der Gehörgang geweitet. **SANOHRA pro dive** am Schaft zwischen Daumen und Zeigefinger der anderen Hand fassen und mit leichter Drehbewegung mit den Lamellen voran in den Gehörgang einsetzen. Bei dem anderen Ohr genau so verfahren.

Herausnehmen von SANOHRA pro dive

Vor dem Herausnehmen die Ohrmuschel wie beschrieben leicht anheben. Den Ohrenschutz **nicht ruckartig herausziehen** sondern langsam mit einer leichten Drehbewegung entfernen.

Kinder dürfen den Ohrenschutz nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Bei Kindern unter 3 Jahren sollte sichergestellt werden, dass der Ohrenschutz ausschließlich von Erwachsenen eingesetzt und auch wieder herausgenommen wird. Die Verwendung des Ohrenschutzes sollte mit dem behandelnden Arzt zuvor besprochen werden. Bei Entzündungen des Ohres, Läsionen des Trommelfells oder dem Einsatz eines Paukenröhrchens fragen Sie zuvor den behandelnden Arzt.

WARNUNG! ERSTICKUNGSRISIKO! KLEINE TEILE. Kinder dürfen den Ohrenschutz nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Die Gehörschutzstöpsel müssen in Übereinstimmung mit den Hinweisen des Herstellers montiert, eingestellt und gewartet werden.

Warnhinweise zur Verwendung von SANOHRA pro dive

Wichtig: Es ist darauf zu achten, dass die Ohren sauber sind und die Bohrung im Gehörschutz sauber und frei ist.

Nach dem Gebrauch **SANOHRA pro dive** mit klarem Wasser abspülen, um Rückstände wie Salz oder Chlor zu entfernen.

SANOHRA pro dive kann bei sachgemäßer Pflege wieder verwendet werden. Zur Reinigung kann das Produkt mit mildem Reinigungsmittel (Seife) gereinigt werden. In regelmäßigen Abständen bitte das Produkt auf Beschädigungen prüfen und gegebenenfalls ersetzen. Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden. Weitere Angaben sollten beim Hersteller angefordert werden. Es wird empfohlen **SANOHRA pro dive** nach Gebrauch wieder in dem mitgelieferten Döschen aufzubewahren. Es sollte dabei kühl und trocken gelagert werden. Alle Teile der Gehörschutzstöpsel sind so konstruiert und produziert, dass sie unter Beachtung der Gebrauchsanweisung beim Tragen keine Verletzungen verursachen.

Die EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.sanohra.com/downloads>



Hersteller: Innosan GmbH · D-68723 Schwetzingen · Beethovenstraße 3 · Germany
E-Mail: info@sanohra.com · Internet: www.sanohra.com